

# Virkon


Rely+On™ VirKon™

## Blanding og bruk

LES PAKNINGSVEDLEGGET! DETTE KAN INNEHOLDE OPPDATERINGER OG ANNEN VIKTIG INFORMASJON!



**1** Velg 0,5 l eller 1 l flaske. Fyll blandeflasken med lunkent vann. 30-35° C.

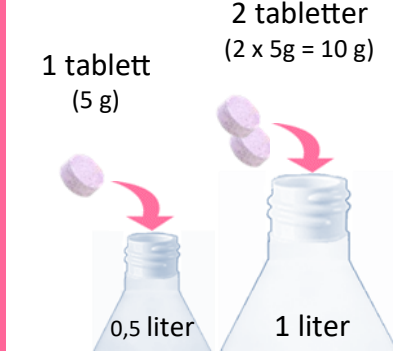

**2** Tilsett tablett(er):  
1 tablett til 0,5 liter flaske  
2 tabletter til 1 liter flaske...



...eller tilsett pulver:  
1 måleskje til 1 liter flaske.  
(Bruk kun 1 L flaske til pulver)



**3** Vend flasken noen ganger og vent fem minutter til tablett(en) / pulveret er helt oppløst.

Løsningen er stabil i inntil **5 døgn**.

Anbefalt praksis er at **brukt løsning skiftes ut daglig**.



Felt for dato /tidspunkt for utblanding

**4** Løsningen er nå klar til bruk. Merk etikett med dato og tidspunkt for utblanding.

### Riktig beskyttelse:

Benytt øyebeskyttelse, hansker og åndedrettsvern.



### Bruksområde:

Til flater og utstyr som senger, operasjonsbord, skjermer etc.

Dokumentert effektivt mot SARS CoV-2 virus.

### Desinfeksjon av overflater:

- Påfør VirKon med godt fuktet klut, svamp eller lignende.
- Bearbeid flaten med klut/svamp godt fuktet med VirKon!
- La VirKon virke i **10 min**.
- Tørk over flaten for å fjerne evt. rester etter desinfeksjonen.

### Synlig forurensning/ flekk-desinfeksjon:

- Fjern først forurensningen på foreskrevet måte, gjerne med en klut fuktet med VirKon. Foreta så desinfeksjon som beskrevet ovenfor.

### Synlig forurenset utstyr:

- La utstyr ligge i VirKon i **30 min**.

### Virketid:

Virketid er 10 minutter uavhengig av type mikroorganismer. Forurenset utstyr skal ligge i løsningen i 30 minutter.



### Effekt:

**VirKon har dokumentert effekt på:**  
Bakterier, Virus og Gjærsopp

**Ikke godkjent for bruk ved TBC/ mykobakterier eller sporer (Cl. difficile).**

### Bruksløsning:

Konsentrasjon 1%  
pH 2,6  
Lukt: svak  
Farge: Rosa. Fargen indikerer god utblanding, men er ingen indikator for holdbarhet/effekt.

### Holdbarhet:

5 døgn fra tidspunkt for utblanding.

### Materialpåvirkning:

VirKon er testet overfor en lang rekke materialer uten påvist skade eller materialpåvirkning. På grunn av lav pH er VirKon ikke egnet til visse legeringer som inneholder aluminium eller kobber (finnes blant annet, i visse endoskop).

### Avfall:

Brukt løsning kan helles direkte i avløp. Skyll etter med vann. Ubrukt pulver og emballasje deponeres i henhold til gjeldende forskrifter.