

Virkon

Rely+On™ Virkon™

Blanding og bruk


LES PAKNINGSVEDLEGGET! DETTE KAN INNEHOLDE OPPDATERINGER OG ANNEN VIKTIG INFORMASJON!



1 Velg 0,5 liter eller 1 liter flaske. Fyll blandeflasken med lunkent vann. 30° - 35°C.



2 Tilsett tablett(er):
1 tablett til 0,5 liter flaske
2 tabletter til 1 liter flaske...

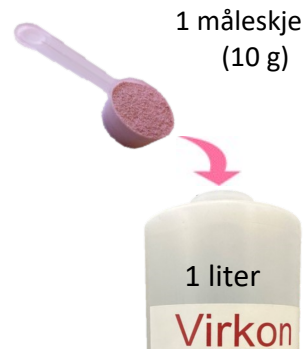

...eller tilsett pulver:
1 måleskje (strøken) til 1 liter flaske.



3 Vend flasken noen ganger til alt pulveret er løst opp, og væsken har fått en rosa farge.

Løsningen er stabil i inntil **5 døgn**.

Anbefalt praksis er at brukt løsning skiftes ut **daglig**.



4 Løsningen er nå klar til bruk. Merk etiketten med dato og tidspunkt for utblanding.

Riktig beskyttelse:

Benytt øyebeskyttelse, hansker og åndedrettsvern.



Bruksområde:

Til flater og utstyr som senger, operasjonsbord, skjermer etc.

Dokumentert effektivt mot SARS CoV-2 virus.

Desinfeksjon av overflater:

- Påfør og bearbeid flaten med klut/svamp godt fuktet med Virkon!
- La Virkon virke i 10 minutter.
- Tørk over flaten for å fjerne eventuelle rester etter desinfeksjonen.

Synlig forurensning/ flekk-desinfeksjon:

- Fjern først forurensningen på foreskrevet måte, gjerne med en klut fuktet med Virkon. Foreta så desinfeksjon som beskrevet ovenfor.

Synlig forurenset utstyr:

- La synlig forurenset utstyr ligge i Virkon i 30 minutter.

Virketid:

Virketid er 10 minutter uavhengig av typer mikroorganismer. Forurenset utstyr skal ligge i løsningen i 30 minutter.



Effekt:

Virkon har dokumentert effekt på: Bakterier, virus og gjæringsopp.

Ikke godkjent for bruk ved TBC/mykobakterier eller sporer (f.eks. *Cl. difficile*).

Bruksløsning (1%):

pH: 2,6
Lukt: svak
Farge: Rosa. Fargen indikerer god utblanding, men er ingen indikator for holdbarhet/effekt.

Holdbarhet:

5 døgn fra tidspunkt for utblanding. Brukt løsning skiftes ut daglig.

Materialpåvirkning:

Virkon er testet overfor en lang rekke materialer uten påvist skade eller materialpåvirkning. Grunnet lav pH, er Virkon ikke egnet til «myke» legeringer (aluminium, kobber, jern, messing) eller stål av lav kvalitet.

Avfall:

Brukt løsning kan helles direkte i avløp. Skyll etter med vann. Ubrukt pulver og emballasje deponeres i henhold til gjeldende forskrifter.