

BLU MANUAL



CAFLON[®]
ENGLAND

Ear piercing opplærings manual

med Caflon Blu Disposable Ear Piercing
System



Manufacturer and Distributor of Ear Piercing Equipment

Denne manualen dekker følgende aspekter ved ørepiercing

- ★ Informasjon om Caflon
- ★ Caflon øredobber
- ★ Ørets anatomi: hvor kan man ta hull
- ★ Sjekk før piercing
- ★ Hvordan bruke Caflon Blu systemet trinn for trinn
- ★ Etterpleie
- ★ Mulige problemer og ytterligere informasjon

Inntroduksjon

- ★ Velkommen til opplæringsmanualen for Caflon Blu øre piercing. Målet med denne håndboken er å gi brukeren klar og presis informasjon om hvordan man kan ta hull i ørene ved bruke av Caflon Blu Ear Piercing System.
- ★ Ørepiercing med bruk av Caflon systemet er en trygg og nyttig profitttjenende tjeneste som krever lite økonomiske investeringer, bruker minimalt med plass og tar kort tid. Fortjenestemarginene er også gode, noe som gjør Caflon Ear Piercing System til en klok og sikker investering.

Et britisk basert firma

- ★ Produserer og distribuerer høykvalitets ørepiercingutstyr og hypoallergene moteøredobber.
- ★ En av de største produsentene og distributørene av ørepiercingutstyr i verden med distribusjon i over 78 land.
- ★ Caflon-øredobbbkolleksjonen består av alle typer steiner og former. Alle er presisjonsaktivert på Swiss Escomatic Machines.
- ★ Caflon har tilgjengelig et bredt spekter av salgs- og markedsføringshjelpemidler, Natural Solution og antiseptiske våtservietter, samt starter kit designet spesielt for nybegynnere av ørepiercing.

Utvalg av øredobber


- ★ Caflon øredobber er laget av hypoallergent materiale, noe som betyr at de ikke forårsaker allergier eller irritasjoner.
- ★ Tilgjengelig i mange forskjellige stiler og størrelser med 24 karat gullplate, hvit rustfritt/silver eller titan.
- ★ Alle dobber leveres i validerte forhåndssteriliserte forpakninger med etylenoksidgass- og gassgjennomtrengende papir.
- ★ Hvert par øredobber har blitt individuelt sterilisert.
- ★ Samsvarer med EC nikkeldirektiv 94/27/EC

Ytre øre

Hvilket område av øret kan du ta hull på med Caflon Blu?

- ★ Øreflippen er det myke området av øret og består av hud som dekker bindefettvev. Dette er området av øret som det kan tas hull i. Tilhelingstiden er 4-6 uker.
- ★ Bruskområdet er en type elastisk vev dekket av hud og fint hår. Området som kan pierces er den flate øvre delen av bruskområdet angitt på diagrammet nedenfor. På grunn av piercing av brusken, er det svært viktig å informere kunden om at selv om piercing av denne delen av øret kan gjøres trygt med Caflon Blu-systemet. Men det må passe ekstra godt på etterpleien ved denne typen piercing. Tilhelingstiden er minst 12 uker.

- ★ Caflon Blu ørepiercing-system er ikke utviklet for å pierce andre deler av kroppen og skal kun brukes til å pierce hull i de skygge-lagte områdene av øret som er angitt på dette bildet

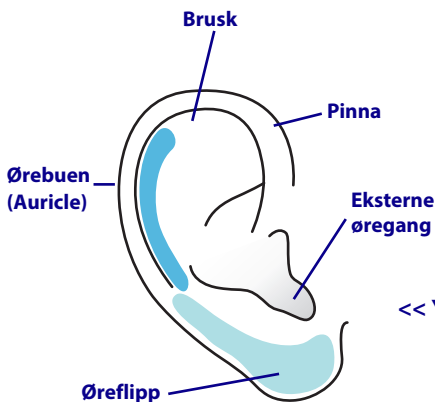

<< Ytre ørets anatomi

Når anbefales det ikke å ta hull i ørene ?

- ★ Man skal ikke ta hull i ørene dersom kunden har en lidelse som gjør at de lett kan få infeksjoner, at sår heles sakte eller har en fysisk skade i huden.
- ★ **Hvis en kunde lider av noe av det følgende, bør de søke medisinsk råd før du tar hull i ørene.**

- Sirkulasjonforstyrrelser
- Høyt eller lavt blodtrykk
- Historie med trombose/emboli
- Epilepsi (Epileptikere må være ledsaget av noen hvis du skal ta hull i ørene)
- Graviditet
- Diabetes (helbredelsestiden)
- Autoimmune sykdommer
- Hudsykdommer (eksem, psoriasis...)
- Blåmerker, nylig sår eller hevelse
- Arrvev eller keloider
- Vorter eller føflekker (du kan pierce hull i fregner)
- Kutt, skrubbsår eller nylige operasjoner

Ikke foreta en piercing om du er i tvil.

CAFLON

Ear piercing training manual

Utstyr

- ★ For å kunne ta hull i øret med Caflon Blu-systemet må du være kjent med utstyret du skal bruke. Utstyret består av piercingpistolen, øredobbene, låsen/ørebeskyttelsen og øredobbholderen, samt pakken med øredobbene.
- ★ Låseholderen/ørebeskyttelsen og øredobbholderen (se neste side) følger ikke med selve instrumentet. Disse er i en forhåndssterilisert eske til engangsbruk. Den steriliserte esken inneholder også øredobben og låsen.
- ★ **VIKTIG! Bruk aldri samme låseholder/ørebeskyttelse og øredobbholder på mer enn én kunde.**




CAFLON

Ear piercing training manual

Innhold i øredobbpakken

låsen

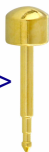

dobben >>

**Låsholderen/
ørebeskyttelsen**



Clip



Dobbholder



Mini (Blå) Regular (Hvit) Large (Beige)

Holder i plast



Forsegling i papir
(Låsholder/ørebeskyttelse, dobbholder
ligger inne i forpakningen)

Plastforpakningen

Ørepiercing trinn for trinn

TRINN 1: FORBERED DEG SELV OG KUNDEN

- ★ Kunder vil vanligvis passe inn i kategoriene "nervøse" eller "ikke nervøse". Åpenbart er "nervøse" kunder potensielt vanskeligere å håndtere. Imidlertid vil det meste av deres angst vanligvis være assosiert med tanken på at piercingen kan være smertefullt. De kan ha hatt en smertefull ørepiercing tidligere. Denne typen kunder må beroliges ved å forsikre de om at Caflon Blu-systemet gir raskt, trygt og enkelt hull i øret.
- ★ Plasser kunden på en krakk eller stol som er i riktig høyde for at du skal fullføre piercingen. Du bør ikke måtte strekke deg opp eller ned for å skyte hull i kundens ører.
- ★ Be kunden velge øredobben som skal brukes
- ★ Forklar prosedyren for piercing og få kunden til å vise legitimasjon og signere registreringsarket for ørepiercing og gi etterbehandlingsinstruksjonsarket.
- ★ Sjekk grundig for indikasjoner på at ørepiercing ikke bør gjennomføres. Hvis du er i tvil, ikke fullfør piercingen.
- ★ Vask hendene grundig eller skrub dem med en klorhexidinbasert kirurgisk håndrens, tørk dem. Ideelt sett bør du bruke engangshansker som en ekstra forholdsregel.
- ★ Få kunden til å fjerne øredobber de har på seg.
- ★ Fest håret bort fra ørene.
- ★ Kontroller kundens ører for epidermoid cyter, som er innebygd hudvev som omslutter fremmed rusk. Hvis du når du klemmer på øret føler en liten, hard klump som flytter på seg, er det en epidermoid cyste. Hvis du kan se og føle en klump som ikke beveger seg, er det arrvev. Cyster er ikke synlige og kan flyttes på, arrvev er synlig og beveger seg ikke. Gjennombror aldri gjennom en cyste, da det vil føre til at den brister og frigjør rusk i det omkringliggende vevet som kan forårsake infeksjon. Du bør heller ikke pierce rett gjennom keloider, som er store synlige klumpete arrvev. Regelen som skal følges er:

Keloider/arrvev, pierce 3 – 4mm unna.

Hvis hullet er åpent, pierce 1cm unna.

Ørepiercing trinn for trinn

- ★ Du må pierce lenger unna hvis hullet er åpent fordi en unøyaktig piercing kan føre til et stort hull i øreflippen. I tillegg unngår du på den måten at låsene overlapper hverandre på baksiden av øret.
- ★ Du kan trenge gjennom et gammelt hull så lenge det ikke er noe tungt arrvev der.
- ★ Etter å ha undersøkt øret, rengjør området som skal pierces grundig foran og bak med en antiseptisk klut, sørg for å bruke en separat klut for hvert øre. Dette vil beskytte mot infeksjon.
- ★ Vent 2 minutter for at den antiseptiske vesken kan suge inn og øret tørke grundig.
- ★ Du bør demonstrere lyden pistolen lager når du skyter/piercer øret for kunden. Hvis de er kjent med lyden, er det mindre sannsynlighet for at de beveger seg under piercingen, noe som reduserer sannsynligheten for en unøyaktig piercing.

For å demonstrere støyen:

- ★ Ta pistolen i din foretrukne hånd.
 - ★ Trekk innskytningspinnen hardt tilbake til den låses.
 - ★ Plasser pistolen nær kundens øre.
 - ★ Fortell dem at de er i ferd med å høre lyden pistolen vil lage.
 - ★ Avfyr pistolen ved å trykke på avtrekkeren.
-
- ★ Når øret er tørt, bør du bruke merkepennen til å markere stedet på øret der det vil bli piercet. Vi anbefaler å ikke bruke annen type penn.
 - ★ Bruk et speil til å vise kunden stedet som er merket på øret.
 - ★ Bare om kunden er enig i at merket er på riktig sted kan du fortsette med piercingen.
 - ★ Hvis de ønsket hullet et annet sted, tørker du av det opprinnelige merket ved hjelp av en annen antiseptisk klut og gjentar de forrige markeringsinstruksjonene.
 - ★ Først når kunden er fornøyd med plasseringen av merket, kan du pierce.

Klargjøring av utstyret

TRINN 2: INSTRUMENTET

- ★ Du må åpne forpakningen på en ren og jevn overflate.
- ★ Riv langs den taggete stripen på forpakningen for skille ett par med øredobber fra de andre.
- ★ På den rene, jevne overflaten snur du pakken opp ned slik at papiretforseglingen vender oppover og plasten hviler på bordets overflate.
- ★ Finn hjørnet der plasten har en bue, her skiller du papiret fra plasten.
- ★ Hold forpakningen nær den jevne overflaten, ta papiret sakte av, vær forsiktig så du ikke mister den blå plastlåsholderen/ørebeskyttelsen og dobbholderen på bordet eller gulvet. Hvis dette skjer, må denne pakningen kastes og en ny brukes. **Dette sikrer sterilitet.**
- ★ Deretter kan du gjøre klar pistolen ved å trekke avfyringsspinnen tilbake til den låses på plass. Benytt hansker på begge hender og ta den lille runde blå(mini) / hvit(vanlig) / beige(stor) dobbholderen fra forpakningen og fest den i pistolens sylinder(**se fig. 1**).
- ★ Ta pistolen i den ene hånden og den blå låsholderen/ørebeskyttelsen i den andre og plasser den blå låsholderen/ørebeskyttelsen godt på holderen på pistolen, pass på at den fleksible ørebeskyttelsen vender oppover og innover (**se fig. 1**) og skyv den godt ned til du hører et klikk.
- ★ Plasser pistolen på et rent underlag.

Klikk på plass
(sørg for at
du hører ett klikk)



Fig. 1

Klargjøring av utstyret

- ★ Hold deretter den gjennomsiktige plastpakken som inneholder dobbpinnen og låsen i den ene hånden, og ta forsiktig opp den blå braketten uten å berøre de sterile dobbene og låsene.
- ★ Holde den blå braketten på sidene, dobben og låsen skal vende oppover.
- ★ Med braketten i den ene hånden tar du piercingpistolen i den andre. Bruker braketten og sett det eksponerte hodet på øredobben inn i den runde plastholderen som tidligere er satt inn på pistolens tønne, og vri deretter braketten oppover for å løsne dobben fra braketten og la dobben stå i plastholderen. (se Fig. 2).
- ★ Sørg for at pistolen holdes i vater, snu plastbraketten og skyv den tilhørende låsen på plass i låsholderen/ørebeskyttelsen.(se Fig. 3).
- ★ Plasser plastbraketten som inneholder den gjenværende dobben og låsen i oppreist posisjonen på en nærliggende ren overflate. Så er den klar til bruk på den andre piercingen om det er ønskelig.
- ★ Pistolen er nå klart til bruk, og du er klar til å skyte hullet. Følg instruksjonene for piercing av kundens øre på neste side.
- ★ Når du har fullført den første piercingen, gjentar du prosessen for den andre piercingen.

Disse operasjonen er enkle å utføre, men du må kanskje øve noen ganger for å bli helt sikker.

Husk at når pistolen er klart, må du alltid oppbevare pistolen i horisontal posisjon for å hindre at dobben og låsen faller ut.

CAFLON

Ear piercing training manual

Klargjøring av utstyret



Fig. 2



Fig. 3

Pierce kundens øre

TRINN 3: PIERCINGEN

- ★ Før pistolen opp til området på kundens øre for å bli piercet, pass på at øret er plassert i den sadellignende fleksible ørebeskyttelsen (se fig. 4). Hvis du piercer bruskområdet se instruksjonene om piercing av bruskområdet som kommer etterpå.
- ★ Sørg for at instrumentet er rett og holdt rett mot øret, ellers vil piercingen skje i en vinkel. Den skal være vinkelrett og ikke være tippet på skrå.
- ★ Klem utløseren forsiktig halvveis inn til du finner et bitepunkt i utløsermekanismen. Dette vil gjøre at spissen av dobben er nærmere øret. Sjekk justeringen (sørg for at punktet på øredobbpinnen er på linje med pennemerket).
- ★ Når du er fornøyd, råd kunden til å holde seg i ro. Klem avtrekkeren hele veien tilbake til tappen skytes inn i øret.
- ★ Hold avtrekkeren på plass og instrumentet stille i to sekunder.



Fig. 4

Pierce kundens øre

- ★ Slipp utløseren sakte og trekk pistolen forsiktig rett ned. Ikke bare dra den bort fra øret (fig. 5).
- ★ Etter å ha festet ny dobb og lås i pistolen på nytt, gjenta samme prosedyre for å utføre den andre piercingen.
- ★ Spør kunden om de klarer å stå eller om de trenger litt tid. Hvis kunden føler seg svimmel når de reiser seg, hjelp dem til å sette seg ned og la dem vente 3 til 5 minutter før de drar.
- ★ Gi råd om etterpleie.

FJERNING AV ENGANGS- ØREDOBBHOLDEREN OG LÅS/ ØREBEKYTTELSES HOLDEREN FRA INSTRUMENTET

- ★ For å fjerne låseholderen/ørebeskyttelsen, skyv den enkelt av instrumentet og kast den i avfallsbeholderen.
- ★ For å fjerne dobbholderen, plasser klemmen over pistolens sylinder (se fig. 5B). Deretter trekker du innskytningspinnen helt tilbake til dobbholderen løsner. Slipp innskytningspinnen og fjern klemmen og stiftholderen. Denne handlingen vil spenne instrumentet, så husk å koble fra innskytningspinnen ved å trykke på avtrekkeren, sørge for at fingrene er fri fra banen til løpet.

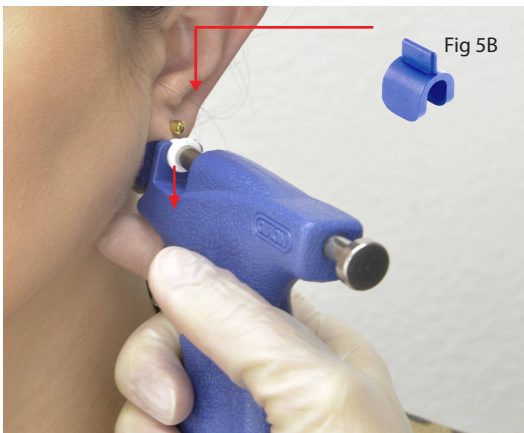


Fig. 5

Pierce kundens øre

PIERCING AV BRUSKOMRÅDET (CARTILAGE) AV ØRET

- ★ Om du tar hull i bruskområdet i øret, må du bare pierce det øvre, flate området. Pierce aldri hull gjennom den krøllete kanten av bruskområdet eller for nær kanten av øret, da dette kan føre til at brusken deler seg. Pierce heller aldri gjennom arrvev i bruskområdet, og unngå alle synlige kapillærer.
- ★ Forbered piercingområdet som instruert tidligere.
- ★ La kunden vippe hodet helt bakover slik at de ser opp i taket. Dette gjør det lettere å plassere pistolen riktig for piercing, samtidig som du holder pistolen i den horisontale posisjonen som sikrer at låsen ikke faller ut før piercingen.
- ★ Hvis klienten har veldig tykk eller kraftig krøllet brus, må du trekke i brusken for å "rulle den ut". Dette sikrer at instrumentet kan plasseres riktig.
- ★ Når pistolen er plassert og klart for avfiring, følg samme prosedyre som beskrevet når du piercet øreflippen tidligere.

VIKTIG!

Informér kunden din om at tilhelingstiden for bruskområdet kan ta opptil 12 uker. Få frem det faktum at siden det er piercing av bruskområdet bør man være ekstra forsiktighet for å sikre riktig etterpleie.

Hvis smerte, rødhet eller hevelse vedvarer, råd dem til å søke lege umiddelbart. Om kunden ikke gjør dette kan det føre til permanent skade på øret.

Etterpleie

Hvis instruksjonene i denne boken om hvordan man tar hull i ørene i følge strengt, vil mulighetene for problemer i ettertid blitt minimert. Betydningen av etterpleie kan imidlertid ikke understrekes for mye.

Kunden bør få følgende råd for etterpleie.

FOR Å UNNGÅ INFEKSJON

- ★ Unngå unødvendig berøring av ører og øredobben.
- ★ Vask hendene grundig før du tar på øredobben eller øre.
- ★ Fest håret tilbake.
- ★ Rens foran og bak øret 2 ganger om dagen (4 ganger ved piercing av ørebrusken) med CAFLON Natural Solution, uten å fjerne øredobben. Ikke bruk bomull eller bomullspads. Roter deretter stiftene 2 - 3 ganger, 180° til venstre og 180° til høyre, dvs. kun en halv omdreining slik at du unngår at hår vikler seg rundt pinnen på baksiden av øreflippen. Mellom rensingene bør øret holdes tørt.
- ★ Unngå å få hårprodukter på øret. Etter shamponering skal øret skylles med rent vann og rengjøres med CAFLON Natural Solution som beskrevet ovenfor.
- ★ Skjønnhets- eller hårbehandlinger bør unngås de første 24 timene.
- ★ Piercingområdet bør rengjøres med CAFLON Natural Solution og deretter holdes tørt, spesielt etter bading, svømming eller trening.

UNNGÅ

- ★ Ikke erstatt øredobben som ble brukt til å pierce med andre øredobber i løpet av de første 6 ukene (**12** uker ved piercing av ørebruskområdet).
- ★ Ikke skyv låsen innover øredobbstiften mot øret. Låsen skal alltid være på enden av stiften slik at det kommer luft mellom øret og låsen.
- ★ Kjenn etter når du renser øret at pinnen sitter løst. Dette sikrer at øredobbene forblir løs under helingsperioden. Om det blir for tett kan det føre til betennelse.

Etterpleie

GENERELLT

- ★ Caflon Natural Care Solution bør foreslås til kunden. Da kan du være sikker på at kunden får riktig etterpleie.
- ★ I løpet av det første året med piercing bør kunden unngå å gå lenger enn 24 timer uten å bruke øredobber. Dette vil sikre at hullene ikke gror igjen.
- ★ Benytt øredobber hvor stiften er av kirurgisk rustfritt stål eller annet hypoallergenisk materiale de første 6 månedene etter piercing.
- ★ Lettere smerte/rødhet kan oppstå umiddelbart - dette er normalt. Det vil bli borte innen 48 timer forutsatt at det utføres riktig etterpleie. Hvis unødig smerte/hevelse/rødhet oppstår, oppsøk lege før du fjerner øredobben.

VED PIERCING AV ØREFLIPPEN

- ★ La øredobben være i ørene sammenhengende i 6 uker.
- ★ Etter 6 uker kan dobben fjernes, og andre øredobber kan benyttes.

VED ØREBRUSK PIERCING

- ★ La øredobben være i ørene sammenhengende i 12 uker.
- ★ Etter 12 uker kan stiften fjernes, og andre øredobber kan benyttes.
- ★ På grunn av ørebruskens natur, bør man være ekstra forsiktighet under tilhelingsperioden.

- ★ Unnlattelse av å følge etterpleieprosedyrer eller søke umiddelbar legehjelp dersom det skulle oppstå et problem, kan føre til permanent skade på ørebrusken.

Riktig behandling gir et pent rundt hull – og ikke en spalte.

Potensielle problemer

- ★ Ørepiercing er en relativt enkel og grei prosedyre der ingenting kan gå galt hvis du følger instruksjonene i denne håndboken nøye.
- ★ Hvor lenge hver enkelt kunde helbredes etter en piercing kan variere enormt, men et gjennomsnitt vil være 4 – 6 uker for øreflippen og 12 uker for bruskdelen.
- ★ Det verste scenariet du kanskje opplever at kunden beveger seg mens du avfyrer pistolen. Dette vil naturlig nok resultere i en unøyaktig piercing.
- ★ Hvis dette skjer, må du ikke fjerne øredobben for da vil øret blø. Råd dem til å la øredobben sitte i over natten, fjern deretter øredobben og la hullet gro igjen.
- ★ Dette rådet gjelder også for kunder som bestemmer seg, til tross for at du har fulgt instruksjonene i manualen, at de ikke liker piercingen. Råd dem til å la øredobben sitte i over natten, fjern deretter øredobben og la hullet gro igjen.



Ear piercing training manual

Annen informasjon

Forutsatt at du har fulgt og forstått instruksjonene i denne håndboken, bør du nå være i stand til å ta hull i ørene ved å bruke Caflon Blu Disposable System.

Det vil fortsatt kunne oppstå problemer som er relevante ved ørepiercing, men dette kommer ikke av selve piercingprosessen.

ØREPIERCING LOVVERK

Det er enhver virksomhet sitt ansvar og sette seg inn i gjeldene lovverk for ørehulltakning/piercing.

Se lovdata.no for gjeldene forskrifter og lovverk:

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-05-06-581>

Vi gjør oppmerksom på **§ 5.Krav til virksomhetens lokaler og melding eller godkjenning av disse:**

Lokaler som skal benyttes til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet, skal tilfredsstillende kravene i første og annet ledd og være godkjent av kommunen før de tas i bruk. Tatoverings- og hulltakingsvirksomhet kan bare utøves i godkjent lokale.(utdrag fra § 5)

Aldersbegrensning

ALDERSBEGRENSNING

- ★ Norsk lov setter ingen nedre aldersgrense for gjennomhulling og penetrering av hud, derimot har de fleste satt den nedre aldersgrensen til 16 år pga. helsemessige årsaker. Vi anbefaler å ikke pierce noen under 16 år uten tilstedeværelse av en forelder eller verge.
- ★ En generell regel å følge vil være å utvise forsiktighet ved hull i ørene til alle under 16 år. Disse kunden bør være i følge med en voksen. Ikke godta samtykke per telefon eller brev. Det anbefales på det sterkeste å la foreldrene eller vergen lese og signere et godkjennelse-skjema i ditt nærvær.
- ★ Selv om det er helt trygt å ta hull i ørene til små barn med Caflon systemet bør man alltid advare forelderen om at på grunn av barnets alder kan det være vanskelig for barnet å følge etterpleie anbefaling. Foreldre bør påta seg ansvaret for å sikre at barnets piercinger vedlikeholdes på riktig måte og å oppsøke lege ved det minste antydning til problem.



Ear piercing training manual

Egne notater:

Leverandør av CAFLON i Norge:

Frends AS

www.frends.no



BLU MANUAL

Caflon Ltd.

Unit 19

Park Street Industrial Estate

Osier Way

Aylesbury

Bucks HP20 1EB

Tel.: 01296 434158

Fax.: 01296 433741

www.caflon.com